

Liebe Helfer, Pfleger, Mediziner, Hilfskräfte... liebe Helden!

In diesem Paket erhaltet ihr 3D-gedruckte Gesichtsschilde.  
Die Teile wurden auf eure Anfrage hin hergestellt.  
Wir hoffen, wir können euch damit helfen. Wir alle danken  
 euch für eure wichtige Arbeit. Wir wünschen euch viel Kraft  
 und Gesundheit.

Euer MakervsVirus-Team  
makervsvirus.org

### Bitte unbedingt beachten!

**Behelfsmäßige** persönliche Ausrüstung ohne zugesagte Schutzfunktion,

**NICHT** getestet, **NICHT** zertifiziert. **Keine** Haftung bzw. Gewährleistung.

Verwendung nach sorgfältiger Prüfung nach eigenem Ermessen.

Die Halter sowie die Visiere sind nicht desinfiziert und wir können nicht ausschließen,  
 dass diese durch uns kontaminiert wurden.

### Desinfektion:

Die einzelnen Teile nicht über 60°C erhitzen, da sich sonst der Kunststoff verformt. Kein  
 Ethylenoxid oder scharfe Mittel benutzen. Bei PVC und PLA getestet sind:

- Wofasteril mit Alcapur als Base, 0.5%ige Lösung
- Sterilium (hinterlässt einen abwischbaren Film)

**Material:** PLA / PETG / PET / ABS / \_\_\_\_

**Verpackungsdatum:**


### Zum Zusammenbau:

Die Löcher der Visiere und die Enden des Lochbands  
 werden an den Pins eingehängt.

Ein Hilfsvideo findet Ihr hier: <https://bit.ly/2JwwJdy>

Weitere Informationen und Hilfen gibt es hier:

<https://bit.ly/345q1oq>

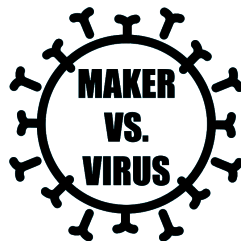

Liebe Helfer, Pfleger, Mediziner, Hilfskräfte... liebe Helden!

In diesem Paket erhaltet ihr 3D-gedruckte Gesichtsschilde.  
Die Teile wurden auf eure Anfrage hin hergestellt.  
Wir hoffen, wir können euch damit helfen. Wir alle danken  
 euch für eure wichtige Arbeit. Wir wünschen euch viel Kraft  
 und Gesundheit.

Euer MakervsVirus-Team  
makervsvirus.org

### Bitte unbedingt beachten!

**Behelfsmäßige** persönliche Ausrüstung ohne zugesagte Schutzfunktion,

**NICHT** getestet, **NICHT** zertifiziert. **Keine** Haftung bzw. Gewährleistung.

Verwendung nach sorgfältiger Prüfung nach eigenem Ermessen.

Die Halter sowie die Visiere sind nicht desinfiziert und wir können nicht ausschließen,  
 dass diese durch uns kontaminiert wurden.

### Desinfektion:

Die einzelnen Teile nicht über 60°C erhitzen, da sich sonst der Kunststoff verformt.  
 Kein Ethylenoxid oder scharfe Mittel benutzen. Bei PVC und PLA getestet sind:

- Wofasteril mit Alcapur als Base, 0.5%ige Lösung
- Sterilium (hinterlässt einen abwischbaren Film)

**Material:** PLA / PETG / PET / ABS / \_\_\_\_

**Verpackungsdatum:**

### Zum Zusammenbau:

Die Löcher der Visiere und die Enden des Lochbands  
 werden an den Pins eingehängt.

Ein Hilfsvideo findet Ihr hier: <https://bit.ly/2JwwJdy>

Weitere Informationen und Hilfen gibt es hier:

<https://bit.ly/345q1oq>

